

MECTRON PROFILASSI PRESTAZIONI ELEVATE PER RISULTATI SORPRENDENTI

mectron



→ LA SOLUZIONE OTTIMALE PER OGNI ESIGENZA CLINICA

Rimozione biofilm sopragengivale



- INTENSE
- SMOOTH
- SOFT
- SENSITIVE

Rimozione pigmentazioni estrinseche



- INTENSE
- SOFT

Rimozione biofilm sottogengivale




- SENSITIVE

Detossificazione tasche parodontali




- SENSITIVE

Mantenimento Implantare

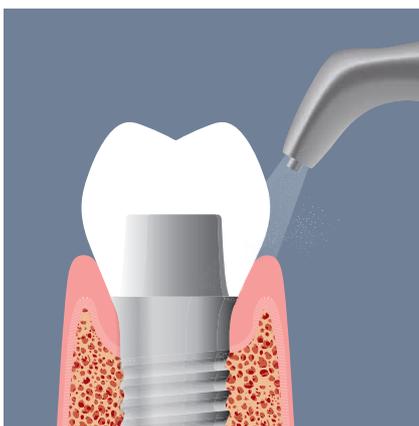

- SENSITIVE

Trattamento perimplantiti

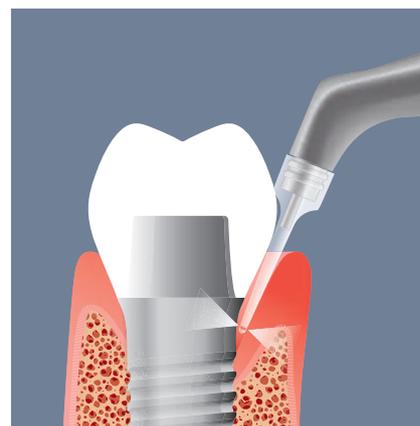

- SENSITIVE

Trattamento brackets ortodontici



-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE

Lucidatura pre-biancamento dentale



-  SMOOTH
-  SENSITIVE

Applicazione su protesi fisse e restauri



-  SMOOTH
-  SENSITIVE

Detersione cavità pre-adesione



-  INTENSE
-  SOFT

Detersione solchi pre-sigillatura



-  INTENSE
-  SOFT
-  SENSITIVE

Mantenimento otturazioni in composito



-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE

→ LA POLVERE SU MISURA PER OGNI PAZIENTE

→ PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

rimuove efficacemente il biofilm batterico sopragengivale e le macchie tenaci sulla superficie dello smalto

INDICAZIONI:

- Rimozione delle macchie tenaci dovute a tabacco o ad altre sostanze pigmentanti
- Detersione di solchi e cavità
- Asportazione dei depositi parzialmente mineralizzati

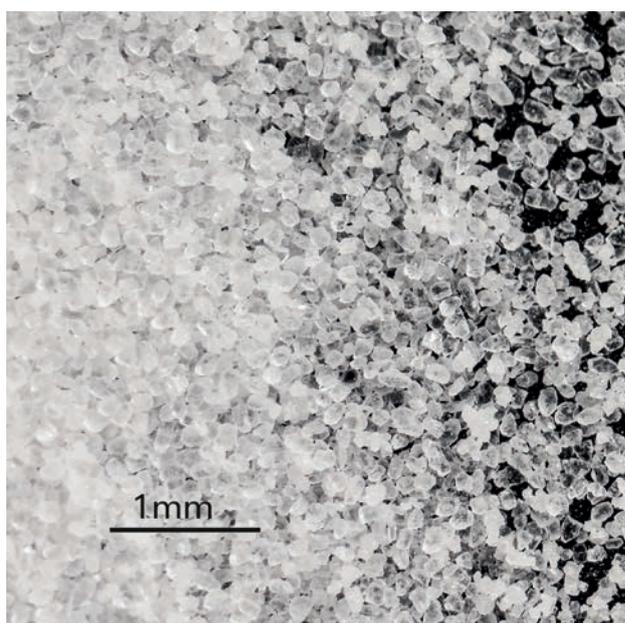


immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere la forma dei cristalli di bicarbonato di sodio

PROPHYLAXIS POWDER INTENSE


- A base di Bicarbonato di Sodio
- Granulometria inferiore a 120 μm
- Gusto limone
- Confezione: 2 flaconi da 250 g ciascuno
- Codice 03140002

→ PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

grazie alla forma sferica delle sue particelle, rimuove efficacemente il biofilm batterico sopragengivale in maniera delicata e minimamente invasiva

INDICAZIONI:

- Dona un effetto brillante sui denti senza danneggiare lo smalto
- Indicata nelle aree più difficili da raggiungere
- Riduce l'acidità del PH orale
- Riduce l'effetto aerosol e l'intasamento dei dispositivi
- Non contiene sale nè silicio
- Adatta ai pazienti sottoposti a diete povere di sodio

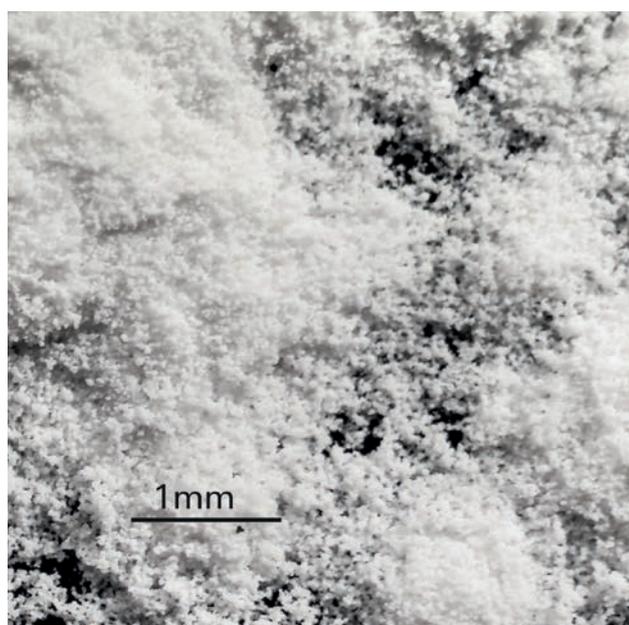

PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

- A base di Carbonato di Calcio
- Granulometria compresa tra 45 μm e 75 μm
- Gusto neutro
- Confezione: 4 flaconi da 250 g ciascuno
- Codice 03140010

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere la forma sferica delle particelle di carbonato di calcio

→ LA POLVERE SU MISURA PER OGNI PAZIENTE

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT

rimuove efficacemente e in maniera delicata il biofilm batterico sopragengivale e le macchie sulla superficie dello smalto

INDICAZIONI:

- Rimozione delle macchie tenaci dovute a tabacco o ad altre sostanze pigmentanti
- Detersione di solchi e cavità
- Detersione dei brackets ortodontici

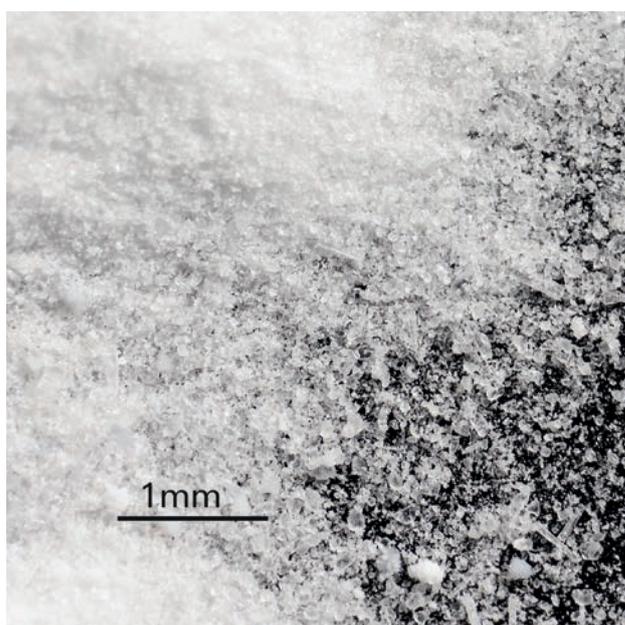


immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere la forma dei cristalli di bicarbonato di sodio

PROPHYLAXIS POWDER SOFT

- A base di bicarbonato di sodio
- Granulometria intorno ai 40 μm
- Gusto menta
- Confezione: 4 flaconi da 250 g ciascuno
- Codice 03140008

→ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE – GLYCINE POWDER

rimuove efficacemente il biofilm batterico sopra e sottogengivale

INDICAZIONI:

- Rimozione delle discromie estrinseche lievi
- Detossificazione delle tasche parodontali
- Mantenimento parodontale
- Mantenimento implantare e trattamento delle peri-implantiti
- Detersione dei brackets ortodontici
- Delicata sui materiali da restauro e sulle superfici radicolari esposte
- Diminuisce la carica batterica nel cavo orale
- Può essere usata in tutte le tipologie di pazienti

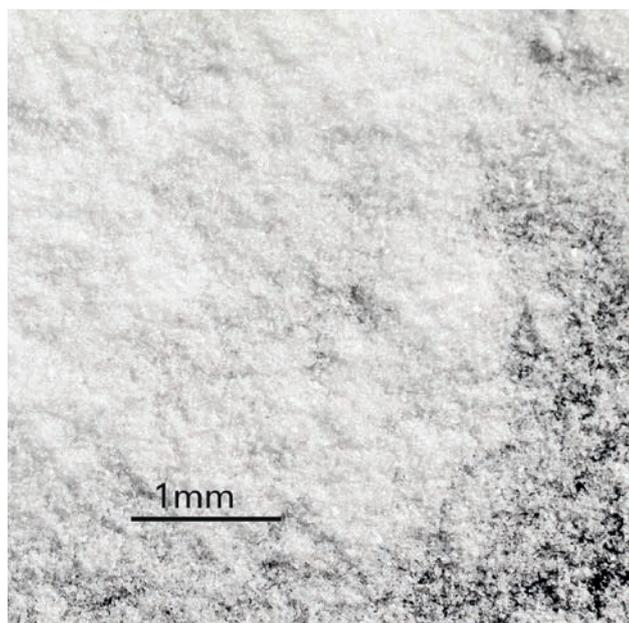


immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere la forma dei cristalli di glicina piccoli e minimamente invasivi

PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE – GLYCINE POWDER

- A base di Glicina
- Granulometria intorno ai 25 μm
- Gusto dolce
- Confezione: 2 flaconi da 160 g ciascuno
- Codice 03140007

→ L'ECCELLENZA NELLA PROFILASSI



→ STARJET

→ Un unico strumento per gestire tutte le polveri Mectron di diversa granulometria per una profilassi completa, sopra e sottogengivale

→ COMBI touch

→ L'approccio parodontale non chirurgico
→ Scaling ultradelicato e air-polishing ALL IN ONE



Per maggiori informazioni sul mondo della profilassi Mectron visita il sito
→ www.mectron.it